



TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS



Controlli di Terza Parte per gli analizzatori Abbott Alinity ci-series

LA AZIENDA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

CONTENUTI

Efficienza del laboratorio migliorata con i prodotti CQ di Technopath. 3

Controlli di Qualità per i Sistemi Alinity ci 4

Maggiore efficienza operativa nei processi di Controllo di Qualità. 5

Materiali per il Controllo di Qualità

Multichem IA Plus 6

Multichem S Plus 7

Multichem P 8

Multichem A1c 8

Multichem U 9

Multichem WBT 9

Software per il Controllo di Qualità

Peer Software. 10

Informazioni per gli Ordini

Informazioni per gli ordini dei prodotti Technopath per i Sistemi Alinity. . . . 11

Informazioni per gli ordini dei prodotti Technopath per i Sistemi Architect . 12

Incremento dell'efficienza del laboratorio con le soluzioni per il CQ di Technopath Clinical Diagnostics

I clienti che utilizzano il CQ Multichem di Technopath aumentano l'efficienza del loro laboratorio, migliorano la qualità della cura del paziente e riducono i costi del loro programma di controllo qualità.

“Il principale motore del cambiamento è stato il mandato di consolidare e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. La riduzione dei costi effettivi, unita ad una riduzione dei tempi di lavoro, si è dimostrata significativa.”

- Eoin O'Rourke,
Head of Pathology, Blackrock Clinic Ltd., Blackrock, County Dublin, Ireland

Technopath è stata la prima azienda al mondo a sviluppare controlli di qualità veramente consolidati per i laboratori ospedalieri. I processi produttivi proprietari consentono l'incorporazione di un maggior numero di analiti in un'unica matrice, il che consente il consolidamento di un ampio menu di test. I due prodotti di punta di Technopath, Multichem® IA Plus e Multichem® S Plus, abbinati contengono più di 190 test. Questi due prodotti possono sostituire fino ad un massimo di 8 prodotti della concorrenza, determinando efficienze significative per i laboratori.


Le materie prime utilizzate per creare la matrice della gamma dei materiali QC di Technopath sono tutte provenienti direttamente da banche del sangue nazionali. L'accesso diretto a plasma fresco congelato di alta qualità garantisce che i prodotti Technopath Multichem QC simulino perfettamente le prestazioni dei campioni reali dei pazienti. In Technopath sono esperti nella stabilizzazione di analiti labili (es. Troponina, Bilirubina, ecc.) e mediante aggiunta di lipidi di origine umana, garantiscono la commutabilità dei controlli tra i vari sistemi analitici. La combinazione di materie prime di alta qualità e di un processo proprietario di produzione conferisce a Technopath un significativo vantaggio competitivo rispetto ai principali concorrenti globali.

**RIDUCE LA
MANIPOLAZIONE
DEL CQ**

**FINO AL
80%**

Si risparmiano fino a 7 giorni di tempo del tecnico all'anno.¹

Prodotto
Concorrenza

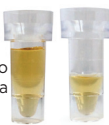

Multichem®
CQ

**RIDUCE IL VOLUME
MORTO DEL
MATERIALE CQ¹**

FINO AL 75%



**RIDUCE IL TEMPO
DI ANALISI DELLO
STRUMENTO¹**

FINO AL 17%



**RIDUCE LO SPAZIO
DI CONSERVAZIONE¹**

FINO AL 80%

**RIDUCE
L'IMPRONTA DI
CARBONIO**

Controlli consolidati che utilizzano meno flaconi e meno imballaggi rispetto ai corrispondenti controlli della concorrenza, con conseguente riduzione dell'impronta di carbonio di un laboratorio¹



**RIDUCE IL NUMERO DI
VALUTAZIONI DI NUOVI
LOTTI DI CQ¹**

FINO AL 87%

1. Microcoat Study, 2016. Studio esterno commissionato da Technopath Clinical Diagnostics. Dati in archivio

L'automazione del controllo di qualità negli analizzatori Alinity ci-series può contribuire ad aumentare la produttività operativa del vostro laboratorio



I processi di Controllo di Qualità del laboratorio (CQ) sono di vitale importanza per garantire risultati accurati dei test sui pazienti, ma spesso richiedono molto tempo al personale di laboratorio. Di conseguenza, i laboratori sono alla ricerca di metodi per ottimizzare i loro processi, senza compromettere sia l'accuratezza che la tempestività dei risultati che forniscono ai medici e ai loro pazienti. Ora, con Alinity ci-series, è possibile sfruttare le capacità del sistema di controllo di qualità per ottimizzare le prestazioni complessive del laboratorio.

La gestione del controllo di qualità aiuta ad automatizzare e migliorare i processi di gestione CQ



I controlli di qualità con codice a barre rendono il caricamento più veloce, più facile e meno soggetto ad errori.¹ Non è più necessario inserire manualmente l'ordine o aliquotare in provette dotate di codice a barre.²

È possibile caricare fino a sei controlli di qualità su un singolo rack, e fino a quattro rack sullo strumento.



Caricamento Continuo - I controlli di qualità possono essere caricati in qualsiasi momento, senza interruzioni nell'analisi dei campioni.



I controlli di qualità possono essere conservati a bordo del sistema, in un carosello di reagenti a temperatura controllata, ed eseguiti automaticamente ad intervalli definiti dall'utente.

1. Technopath fornisce sei controlli multiparametrici tra chimica clinica e immunoenzimatica, quattro dei quali possono essere conservati a bordo dell'analizzatore.
2. Per analiti selezionati.

**Technopath e Abbott
aiutano il vostro laboratorio
ad ottenere una maggiore
efficienza operativa nei
processi di CQ.**



Accreditamento/Rispetto delle Normative

Il materiale CQ di terza parte facilita il rispetto delle linee guida di accreditamento e delle normative come CLIA, CLSI, CAP e ISO.



Mirato ai Valori Clinici Decisionali

Il materiale di controllo mirato ai valori clinici decisionali aiuta a migliorare la fiducia dei medici nella validità dei risultati dei test.



Valore Assegnato

L'assegnazione del valore fa risparmiare tempo al tecnico quando si impostano gli intervalli di riferimento iniziali.



File XML

Vengono utilizzati file XML per facilitare il caricamento automatico dei valori e degli intervalli per i sistemi Alinity ed Architect, azzerando potenziali errori ed aumentando la produttività.



Matrici a Base Umana

Le matrici a base umana forniscono prestazioni simili a quelle dei pazienti per aumentare la fiducia nei risultati dei materiali CQ.



Conferma del lotto

Il test di conferma del lotto dei 20 test principali aiuta ad accelerare la risoluzione dei problemi dei materiali CQ*.



Lotti di Grandi Dimensioni

Lotti di grandi dimensioni, e meno cambi di lotto, in media due all'anno.



Caricamento Automatico dei Risultati su IAMQC® Peer Senza Necessità di Installazione Hardware

Invio automatico dei risultati del CQ su IAMQC Peer tramite AbbottLink, senza necessità di hardware o software aggiuntivo, per soddisfare i requisiti per l'accreditamento^{1,2}

Dimensione del Gruppo di Pari

Dati provenienti da oltre 1.500 sistemi Abbott.

Report di Confronto del CQ Interlaboratorio

Il software Technopath IAMQC® offre report Six-Sigma, Levey-Jennings, Youden, Bias, Coordinatore del Gruppo, Riepilogo Mensile e Report delle Eccezioni per fornire al laboratorio tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del CQ.

* Attualmente disponibile solo per i sistemi Architect.

1. "Il laboratorio deve partecipare ai confronti interlaboratorio "ISO 15189: 2003(E), Sottoclausola 5.6.4.

2. Un laboratorio dovrebbe partecipare attivamente ai programmi di controllo di qualità interlaboratorio quando tali programmi siano disponibili". CLSI, C24-A3, Vol. 26, n. 25.

Multichem® IA Plus

Consolidamento dei test per il controllo di qualità per immunoenzimatica, gestito integrato o in manuale, in Formato Liquido Stabile



Caratteristiche

- Formulazione proprietaria su matrice umana
- Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti
- Liquido pronto all'uso
- 86 Analiti (35 dosati)
- Il controllo immunoenzimatico consolidato include test di Immunoenzimatica generale, marcatori cardiaci e marcatori tumorali
- Tre Livelli anche per le proteine leganti tra cui SHBG, Anti-TG e Anti-TPO

- Dosato ed ottimizzato per Alinity e mirato ai livelli decisionali clinici:
- Con particolari benefici per FT4 e FT3

Specifiche

- Stabilità dei flaconi chiusi 28 mesi a -20°C / -80°C
- Stabilità dei flaconi onboard 5 giorni
- Stabilità dei flaconi aperti 10 giorni a 2°C / 8°C
- Le eccezioni specifiche del lotto sono annotate nelle istruzioni

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem IA Plus	Dosato Tre Livelli	3 x 4 x 5mL (60mL)	08P86-10

Lista Analiti: con Valori Assegnati per Alinity

25-OH Vitamina D	Estradiolo	Prolattina
Alfa Fetoproteina (AFP)	Ferritina	PSA, Libero
Antigene Embrionale Carcinogenico (CEA)	Folati	PSA, Totale
Anti-tireoglobulina	Follicle Stimulating Hormone (FSH)	Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
Anti-tireoperossidasi	Gonadotropina Corionica Umana (hCG)	Testosterone
BNP (1-32)	Insulina	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
CA 125	Mioglobina	Tiroxina, Libera (FT4)
CA 15-3	Omocisteina	Tiroxina, Totale (TT4)
CA 19-9	Ormone Luteinizzante (LH)	Triiodotironina, Libera (FT3)
CK-MB	Ormone Paratiroideo (PTH) (1-84)	Triiodotironina, Totale (TT3)
Cortisolo	Ormone Paratiroideo (PTH) (1-84) (STAT)	Troponina I ad Alta Sensibilità
C-Peptide	Progesterone	T-Uptake
DHEA-Solfato		Vitamina B12

Lista Analiti: Senza Valori Assegnati

17-Idrossiprogesterone	Disopiramide	NT Pro-BNP
Acetaminofene	EPO	Ormone Adrenocorticotropo (ACTH)
Acido Valproico	Estriolo, Libero	Ostasi
Acido Valproico, Libero	Estriolo, Totale	Primidone
Aldosterone	Estrogeno, Totale	Procainamide
Amikacina	Etosuccimide	Procollagene Tipo 1 (P1NP)
Androstenedione	Fenitoina	Renina
Angiotensina	Fenitoina, Libera	Salicilati
Caffeina	Fenobarbital	TBG Thyroxine Binding Globulin
Calcitonina	Gentamicina	Teofillina
Carbamazepina	Human Growth Hormone	Testosterone, Libero
Carbamazepina, Libera	Ibuprofene	Tireoglobulina
Chinidina	Immunoglobulina E	Tobramicina
Ciclosporina	Insulin-Like Growth Factor (IGF-1)	Troponina T
Cloramfenicolo	Lidocaina	Vancomicina
CRP Ultra Sensibile	Litio	
Digossina	N-Acetil Procainamide	

Multichem® S Plus

Consolidamento dei test
per il controllo di qualità
per la Chimica del Siero e la
Immunologia, gestito integrato
o in manuale, in Formato
Liquido Stabile



Caratteristiche

- Formulazione proprietaria su matrice umana
- Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti.
- Liquido pronto all'uso
- 104 Analiti (56 dosati)
- Tre Livelli anche per le Immunoproteine
- Con aggiunta di estratti lipidici umani
- Tre livelli anche per Colesterolo HDL

e LDL, Apo A1 e Apo B

- Gamma completa di farmaci: litio, amikacina e vancomicina compresi

Specifiche

- Stabilità dei flaconi chiusi 28 mesi a -20°C \ -80°C
- Stabilità dei flaconi onboard 5 giorni
- Stabilità dei flaconi aperti 10 giorni a 2°C / 8°C
- Le eccezioni specifiche del lotto sono annotate nelle istruzioni

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem S Plus	Dosato Livello Singolo (Livello 1)	12 x 5mL (60mL)	08P88-10
	Dosato Livello Singolo (Livello 2)	12 x 5mL (60mL)	08P88-11
	Dosato Livello Singolo (Livello 3)	12 x 5mL (60mL)	08P88-12
	Non Dosato Livello Singolo (Livello 1)	12 x 5mL (60mL)	08P87-10
	Non Dosato Livello Singolo (Livello 2)	12 x 5mL (60mL)	08P87-11
	Non Dosato Livello Singolo (Livello 3)	12 x 5mL (60mL)	08P87-12

Lista Analiti: con Valori Assegnati per Alinity

Alfa-1 Glicoproteina Acida	Apolipoproteina B	Complemento C3	Immunoglobulina M
Alfa-1 Antitripsina	Aptoglobina	Complemento C4	Lattato
Acidi Biliari	Aspartato Aminotransferasi (AST)	Creatina Chinasi (CK)	Lattico Deidrogenasi (LDH)
Acido Urico	Aspartato Aminotransferasi Attivata (AAT)	Creatinina Enzimatica	Litio
Acido Valproico	Azoto Ureico	Creatinina Picrato	Magnesio
Alanina Aminotransferasi (ALT)	Beta-2 Microglobulina	Digossina	Potassio
Alanina Aminotransferasi Attivata (AALT)	Bilirubina, Diretta	Etanolo	Prealbumina
Albumina BCG	Bilirubina, Totale	Fattore Reumatoide	Proteina C-Reattiva
Albumina BCP	Calcio	Fenitoina	Proteine, Totali
Alfa-1 Glicoproteina Acida	Carbamazepina	Fenobarbital	Salicilati
Amikacina	Ceruloplasmina	Ferro	Sodio
Amilasi	Cloro	Fosfatasi Alcalina	Teofillina
Amilasi Pancreatica	Colesterolo HDL	Fosforo	Tobramicina
Anidride Carbonica (Bicarbonato)	Colesterolo LDL	Gamma Glutamilttransferasi	Transferrina
Apolipoproteina A1	Colesterolo Totale	Gentamicina	Trigliceridi
	Colinesterasi	Glucosio	UIBC
		Immunoglobulina A	Vancomicina
		Immunoglobulina G	

Lista Analiti: Senza Valori Assegnati

ACE (Angiotensin Converting Enzyme)	Bilirubina Indiretta	Cortisolo	IgG4, Subclasse
Acetaminofene*	C1 Inhibitor	Elettroforesi Proteine	Lipasi*
A-DNasi B (DNasi B Anti-Streptococco)	Caffeina	Emopexina	Osmolalità
Alfa Idrossibutirrato Deidrogenasi	Calcio Ionizzato	Ferritina	Properdina Fattore B
Alfa-2-Macroglobulina	Capacità Ferro Legante Totale	Fosfatasi Acida	Rame
Anti-Streptolisina O (ASO)	Catene Leggere Kappa	Fosfatasi Acida Prostatica	Retinol Binding Protein
Antitrombina III	Catene Leggere Lambda Lipoproteina a)	Fruttosamina	sTfR (Recettore Solubile della Transferrina)
Beta Idrossibutirrato Deidrogenasi	CH50 (Complemento Emolitico Totale)	IgE	Tiroxina, Totale (TT4)
	Cistatina C	IgG1, Subclasse	Triiodotironina, Totale (TT3)
		IgG2, Subclasse	Zinco
		IgG3, Subclasse	

* Disponibili a breve

Multichem® P

Consolidamento dei test per il controllo di qualità per Immunologia, gestito integrato o in manuale, in Formato Liquido Stabile



Caratteristiche

- Formulazione proprietaria su matrice umana
- Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti
- Liquido pronto all'uso
- 39 Analiti (16 dosati)
- Controllo supplementare delle immunoproteine a livello singolo a complemento di Multichem S Plus
- Fornisce valori veramente elevati di proteine specifiche per controllare l'intervallo analitico

- Permette un controllo a tre livelli per il Fattore Reumatoide se utilizzato in combinazione con Multichem S Plus

Specifiche

- Stabilità dei flaconi chiusi 28 mesi a -20°C \ -80°C
- Stabilità dei flaconi onboard 7 giorni
- Stabilità dei flaconi aperti 14 giorni a 2°C / 8°C
- Le eccezioni specifiche del lotto sono annotate nelle istruzioni

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem P	Dosato Livello Singolo	12 x 3mL	08P90-10

Lista Analiti: con Valori Assegnati per Alinity

Alfa-1 Antitripsina	Ceruloplasmina	Immunoglobulina M
Alfa-1 Glicoproteina Acida	Complemento C3	Prealbumina
Apolipoproteina A1 (APO A1)	Complemento C4	Proteina C-Reattiva
Apolipoproteina B (APO B)	Fattore Reumatoide	Transferrina
Aptoglobina	Immunoglobulina A	
Beta-2 Microglobulina	Immunoglobulina G	

Lista Analiti: Senza Valori Assegnati

A-DNasi B (Anti-Streptococcal DNase B)	Catene Leggere Kappa	IgG2, Subclasse
Albumina	Catene Leggere Lambda	IgG3, Subclasse
Alfa-2-Macroglobulina	CH50 (Total hemolytic Complement)	IgG4, Subclasse
Angiotensin Converting Enzyme	Cistatina C	Lipoproteina (a)
Anti-Streptolisina O (ASO)	Emopexina	Properdina Fattore B
Antitrombina III	Ferritina	Retinol Binding Protein
C1 Inhibitor	IgE	sTfR (Recettore Solubile della Transferrina)
	IgG1, Subclasse	Proteine Totali

Multichem® A1c

Controllo gestito solo in Manuale, per il Diabete, Emoglobina A1c, in Formato Liquido Stabile



Caratteristiche

- Ottimizzato e con valori assegnati per i sistemi Abbott ARCHITECT e Alinity
- Liquido pronto all'uso
- Valori target su materiale a due livelli per monitorare l'intervallo clinico e analitico nei principali punti decisionali clinici
- Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti

- Analiti: A1c, %HbA1

Specifiche

- Stabilità dei flaconi chiusi 24 mesi a -20°C / -80°C
- Stabilità dei flaconi aperti 30 giorni a 2°C / 8°C
- Le eccezioni specifiche del lotto sono annotate nelle istruzioni

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem A1c	Dosato 2 Livelli	2 x 6 x 1mL	04VO6-10

Lista Analiti: con Valori Assegnati per Alinity

% HbA1c

Multichem® U

Consolidamento dei test per il controllo di qualità per la Chimica delle Urine, gestito integrato o in manuale, in Formato Liquido Stabile



Caratteristiche

- Liquido stabile, controllo a 2 livelli a matrice umana
- Simula le prestazioni dei campioni dei pazienti
- 18 Analiti (14 dosati)
- Maggiore stabilità e migliori prestazioni per la creatinina
- Dosato ed ottimizzato per la famiglia di analizzatori Alinity
- L'aggiunta di microalbumina umana garantisce maggiore precisione e migliori prestazioni

Specifiche

- Stabilità dei flaconi chiusi 24 mesi a 2°C / 8°C
- Stabilità dei flaconi onboard 7 giorni
- Stabilità dei flaconi aperti 30 giorni a 2°C/ 8°C
- Le eccezioni specifiche del lotto sono annotate nelle istruzioni

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem U	Dosato 2 Livelli	2 x 6 x 5mL (60mL)	08P89-10

Lista Analiti: con Valori Assegnati per Alinity

Acido Urico
Amilasi
Azoto Ureico
Calcio
Cloro

Creatinina Enzimatica
Creatinina Picrato
Fosforo
Glucosio
Magnesio

Microalbumina
Potassio
Proteine Urinarie
Sodio

Lista Analiti: Senza Valori Assegnati

Cortisolo
Gonadotropina Corionica Umana

Osmolalità
Peso Specifico

Multichem® WBT

Controllo da gestire solo in manuale, per Immunosoppressori, in Formato Liquido Stabile



Caratteristiche

- Liquido stabile, controllo a 3 livelli a matrice umana
- La matrice umana ottimizza le prestazioni ed il recupero degli immunosoppressori
- 5 Analiti (3 dosati)
- Dosato ed ottimizzato per la famiglia di analizzatori Alinity

Specifiche

- Stabilità dei flaconi chiusi 30 mesi a -20°C / -80°C
- Stabilità dei flaconi aperti 10 giorni a 2°C / 8°C
- Le eccezioni specifiche del lotto sono annotate nelle istruzioni

Prodotto	Descrizione	Confezione	Codice
Multichem WBT	Dosato 3 Livelli	3 x 4 x 2mL (24mL)	04S16-10

Elenco Analiti: con Valori Assegnati per sistemi Architect e Alinity

Ciclosporina
Sirolimus
Tacrolimus

Lista Analiti: Senza Valori Assegnati

Glucosio
Globuli Rossi
Folati



Migliora le attività del laboratorio con l'unico software di confronto Peer supportato da Abbottlink



IAMQC® Peer agevola i laboratori che testano materiale di controllo con il medesimo numero di lotto, fornendo preziose informazioni provenienti da altri utenti che utilizzano lo stesso strumento, attraverso il confronto tra pari. I Report elaborati da IAMQC Peer permettono di confrontare l'accuratezza e la precisione dei processi analitici tra laboratorio e gruppi di pari. Queste informazioni possono aiutare i laboratori a determinare se i loro sistemi sono sotto controllo, esaminando i risultati dei loro strumenti e verificandone rapidamente le prestazioni rispetto al gruppo di pari

Report Metriche Sigma

Offre agli utenti finali la possibilità di calcolare e rivedere automaticamente le prestazioni rispetto alle metriche sigma.

Report Bias

Il Report Bias fornisce un confronto dettagliato tra laboratorio, affiliati e gruppi di pari. Questo report è generato in un file Microsoft Excel.

Report del Coordinatore del Gruppo (Group Coordinator Report)

Fornisce test per test le statistiche del laboratorio e dei suoi gruppi di pari. Il Group Coordinator Report documenta tutti i dati rilevanti presentati a IAMQC e fornisce automaticamente un'analisi statistica

Report Levey Jennings

Il report Levey Jennings Report visualizza le singole medie CQ giornaliera per il mese selezionato per un analita specifico. Il report può essere generato per due o tre livelli di materiale CQ.

Report Riepilogativo Mensile (Monthly Summary Report)

Per ciascun test e livello di controllo, questo report riassume le statistiche relative agli ultimi dodici mesi e al periodo del lotto in uso nel laboratorio e dei suoi gruppi di pari per i confronti intra-laboratorio e interlaboratorio a lungo termine.

Report delle Eccezioni (Exception Notes Report)

Questo report riassume i test e i metodi analitici del laboratorio che differiscono per prestazioni dal gruppo di pari, utilizzando i criteri di performance SDI, CVI ed Errore Totale.

Report Youden Plot

Il Report Youden descrive le prestazioni interne del laboratorio rispetto al gruppo di pari, per sistema analitico e per principio del metodo, utilizzando il diagramma di Youden.

Controlli di Qualità per Sistemi Alinity

Ordinabili tramite la Vostra Filiale Abbott locale

NOME PRODOTTO	CODICE ABBOTT	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
Multichem IA Plus	08P86-10	3 x 4 x 5mL	• 3 Livelli • CQ • Immunoenzimatica • Siero • 86 analiti (35 dosati)
Multichem S Plus Assayed	Livello 1: 08P88-10 Livello 2: 08P88-11 Livello 3: 08P88-12	12 x 5mL 12 x 5mL 12 x 5mL	• Singolo Livello • CQ Chimica Siero e Immunologia • Siero • 104 analiti (56 dosati)
Multichem S Plus Unassayed	Livello 1: 08P87-10 Livello 2: 08P87-11 Livello 3: 08P87-12	12 x 5mL 12 x 5mL 12 x 5mL	• Singolo Livello • CQ Chimica Siero e Immunologia • Siero • 104 analiti
Multichem hsTn	04W26-10	12 x 3 mL	• Singolo Livello • Siero • 1 analita, dosato
Multichem P	08P90-10	12 x 3mL	• Singolo Livello • CQ Immunoproteine del Siero • Siero • 39 analiti (16 dosati)
Multichem A1c	04VO6-10	2 x 6 x 1mL	• 2 Livelli • CQ HbA1c • Sangue intero • 1 analita, dosato
Multichem U	08P89-10	2 x 6 x 5mL	• 2 Livelli • CQ Chimica Urine • Urine • 18 analiti (14 dosati)
Multichem WBT	04S16-10	3 x 4 x 2mL	• 3 Livelli • CQ Sangue Intero Trapianti • Sangue Intero • 5 analiti (3 dosati)

Controlli di Qualità per Sistemi ARCHITECT

**Ordinabili tramite la
Vostra Filiale Abbott
locale**

NOME PRODOTTO	CODICE ABBOTT	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
Multichem IA Plus	05P76-10	3 x 12 x 5mL	• 3 Livelli • CQ Immunoenzimatica • Siero • 86 analiti (35 dosati)
Multichem S Plus - Assayed	Livello 1: 05P78-10 Livello 2: 05P78-11 Livello 3: 05P78-12	12 x 5mL	• Singolo Livello • CQ Chimica Siero e Immunologia • Siero • 104 analiti (56 dosati)
Multichem S Plus - Unassayed	Livello 1: 05P79-10 Livello 2: 05P79-11 Livello 3: 05P79-12	12 x 5mL	• Singolo Livello • CQ Chimica Siero e Immunologia • Siero • 104 analiti
Multichem hsTn	04W26-10	12 x 3 mL	• Singolo Livello • Siero • Dosato
Multichem P	05P81-10	12 x 3mL	• Singolo Livello • CQ Immunoproteine del Siero • Siero • 39 analiti (16 dosati)
Multichem U	05P80-10	2 x 12 x 5mL	• 2 Livelli • CQ Chimica Urine • 18 analiti (14 dosati)
Multichem A1c	04VO6-10	2 x 6 x 1mL	• 2 Livelli • CQ HbA1c • Sangue Intero • 1 analita, dosato
Multichem WBT	05P77-10	3 x 12 x 5mL	• 3 Livelli • CQ Sangue Intero Trapianti • Sangue Intero • 5 analiti (3 dosati)
Tappi Gocciolatori	06P18-01	100 per conf.	



TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

LA AZIENDA DEL CONTROLLO DI QUALITÀ

www.technopathcd.com

info@technopathcd.com | Tel: +353 61 525700 | Fax: +353 61 203034

Technopath Life Sciences Park, Fort Henry, Ballina, Co. Tipperary, V94 FF1P, Ireland.